

# Pessary silikonowe „Dr Arabin”

We współczesnej uroginekologii należy dążyć do stosowania mało inwazyjnych, skutecznych metod leczenia. Jedną z metod nieinwazyjnej terapii zachowawczej, cieszącą się dużym powodzeniem wśród pacjentek, jest pessaroterapia. Oryginalne pessary „Dr Arabin” wykonane są z miękkiego silikonu, co znacznie poprawia tolerancję i zmniejsza ryzyko powikłań. Powodzenie terapii z użyciem pessarów zależy od ich prawidłowego dopasowania i zgodnego z zaleceniami stosowania przez pacjentki. Szeroko polecamy pessaroterapię tylko w ciągu dnia: rano pacjentka zakłada pessar, wieczorem go wyjmuje. Zaletą jest brak upławów i odleżyn.

**Sklep: [www.pessary.pl](http://www.pessary.pl)**

**Strona internetowa: [www.pessary.info.pl](http://www.pessary.info.pl), [www.pessaroterapia.pl](http://www.pessaroterapia.pl)**

**Informacja o szkoleniach: [www.uroginekologia.info.pl](http://www.uroginekologia.info.pl)**

*Dla lekarzy możliwość zamówienia pakietu 6 lub 12 pessarów do przymierzania w promocyjnej cenie.*

## Pessary dla kobiet z nietrzymaniem moczu:




**Pessar cewkowy (pierścieniowy ze zgrubieniem na okolicę cewki, z aluminiowym rdzeniem)**

– **rozmiary:** od 45 do 100 mm (przyrost co 5 mm)

Używany przy wysiłkowym lub mieszanym (WNM/NNM) nietrzymaniu moczu

- efekt ten uzyskuje się, gdy zgrubienie pessara podtrzymuje okolicę połączenia pomiędzy pęcherzem a cewką moczową.

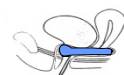

## Pessary dla pacjentek z nietrzymaniem moczu i z zaburzeniami statyki narządu płciowego:



**Pessar cewkowy kołnierzowy (ze zgrubieniem na okolicę cewki)**

– **rozmiary:** od 55 do 90 mm (przyrost co 5 mm)

Przydatny przy wysiłkowym lub mieszanym (WNM/NNM) nietrzymaniu moczu, współwystępującym z obniżeniem ścian pochwy.



**Pessar pierścieniowy (z aluminiowym rdzeniem)**

– **rozmiary:** od 50 do 100 mm (przyrost co 5 mm)

Stosowany przy niezbyt nasilonych objawach wysiłkowego nietrzymania moczu oraz małym lub miernym obniżeniu ścian pochwy poprzez efekt podtrzymania okolicy podcewkowej.



**Pessar pierścieniowy z możliwością odkształcania - Hodge (z aluminiowym rdzeniem)**

– **rozmiary:** od 55 do 95 mm (przyrost co 5 mm)

Pessar ten można uformować do indywidualnych kształtów. Stosowany jest w leczeniu nietrzymania moczu i zaburzeń statyki narządu płciowego w przypadku, gdy innych pessarów nie da się dopasować.



## Pessary dla kobiet ze zwężeniem pochwy:

**Expander pochwowy (do rozszerzenia pochwy)**

•Bardzo mały - 20 mm

•Mały - 26 mm

•Średni - 30 mm

•Duży - 37 mm

Wykonany ze specjalnego, jest elastyczny i dlatego może być zakładany bezboleśnie. Ekspandery pochwowe są wskazane u pacjentek z wadami wrodzonymi lub jatrogennymi zwężeniami pochwy.



**Dystrybucja w Polsce: Centrum Medyczne "Być kobietą..."**

**Stare Krasnodęby 15B, 95-070 Aleksandrów Łódzki**

**Tel. +48 509 492 281, +48 505 116 335, +48 505 116 336**

**[www.pessary.pl](http://www.pessary.pl) [www.pessary.info.pl](http://www.pessary.info.pl) [pessary.pl@gmail.com](mailto:pessary.pl@gmail.com)**

**Produkcja w Niemczech: Dr. Arabin GmbH & Co. KG**



# Pessary silikonowe „Dr Arabin”

## Pessary dla pacjentek z zaburzeniami statyki narządu płciowego:



### Pessar kostkowy

– **rozmiary:** nr 0 – 25 mm, nr 1 – 29 mm, nr 2 – 32 mm, nr 3 – 37 mm, nr 4 – 41 mm, nr 5 – 45 mm

Najczęściej stosowany, przy różnych stopniach obniżenia pochwy i macicy. Efekt podciśnienia pozwala na lepszą stabilność pessara. Także do rozluźnienia zrostów i zwężeń pochwy oraz by leczyć kłopoty z oddawaniem moczu. Dodatkowo przed operacjami likwidującymi wypadanie pochwy i/lub macicy wraz z estrogenami dopochwowymi, aby poprawić krążenie tkankowe.

### Pessar tandem

Jest wykonywany na specjalne zamówienie, jeżeli pochwa nie jest w stanie utrzymać pojedynczego pessara. To połączone dwa pessary kostkowe, dla pacjentek ze znacznym obniżeniem pochwy i macicy (3 lub 4 stopnia). Dodatkowo pessar tandem może być przydatny w przypadkach wysiłkowego nietrzymania moczu: dolna kostka wspiera funkcję cewki moczowej.

### Pessar grzybkowy

– **rozmiary:** od 50 do 90 mm (przyrost co 5 mm)

Używany tylko w wyjątkowych sytuacjach przy wypadaniu pochwy i macicy (3 lub 4 stopnia), tylko gdy inne pessary nie są skuteczne, ponieważ prowadzi do osłabienia mięśni dna miednicy.

### Pessar talerzowy

– **rozmiary:** od 55 do 95 mm (przyrost co 5 mm)

Zbudowany z miękkiego, elastycznego silikonu, dlatego może być z łatwością zginany, zakładany i wyjmowany bez uczucia bólu. Stosowany jest do leczenia niezbyt nasilonych postaci obniżenia przedniej ściany pochwy - podtrzymuje zarówno uszkodzenie centralne, jak i boczne.

### Pessar pierścieniowy gruby

– **rozmiary:** od 50 do 100 mm (przyrost co 5 mm)



Stosuje się zwykle u starszych pacjentek z niezbyt dużymi obniżeniami ścian pochwy i miernego stopnia wypadaniem macicy bez nietrzymania moczu.

## Pessary dla pacjentek w ciąży z niewydolnością szyjki macicy:

### Pessar Cerclage

- średnica dolnego otworu - 65 lub 70 mm
- wysokość - 17 mm, 21 mm, 25 mm lub 30 mm
- średnica górnego otworu - 32 lub 35 mm

Najczęściej stosowane rozmiary: 65/21/32 i 65/21/35

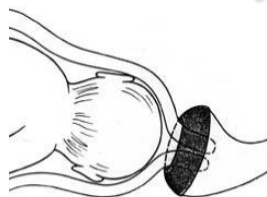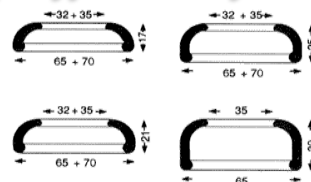

Pessary firmy Dr Arabin były wykorzystane w kilku badaniach klinicznych. Wyniki były przedstawione między innymi w czasopiśmie Lancet w artykule pt.: "Cervical pessary in pregnant women with a short cervix (PECEP): an open-label randomised controlled trial,,.

Artykuł dostępny jest na naszej stronie internetowej: [www.pessary.info.pl](http://www.pessary.info.pl)

### NOWOŚĆ!

Nowy pessar cerclage Dr Arabin, wykonany ze specjalnego silikonu.

Dystrybucja w Polsce: Centrum Medyczne "Być kobietą..."

Stare Krasnodęby 15B, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Tel. +48 509 492 281, +48 505 116 335, +48 505 116 336

[www.pessary.pl](http://www.pessary.pl) [www.pessary.info.pl](http://www.pessary.info.pl) [pessary.pl@gmail.com](mailto:pessary.pl@gmail.com)

Produkcja w Niemczech: Dr. Arabin GmbH & Co. KG

